

國泰醫管 喜樂美

K.T CERAMIT

動靜脈瘻管針

A-V Fistula Needle Set

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用。

衛署醫器製字第 003284 號

使用說明書

適應症：該產品係配合洗腎血液迴路導管，為進行血液透析時使用。

禁忌症：本產品接觸血液部分皆使用無毒性醫療級原料，並經滅菌處理。使用時詳閱下列注意事項，並遵照醫生的指示使用。

1. 保管時的注意事項：
 - a. 注意勿使製品淋溼，避免陽光直射及高溫多溼，保管於清潔的場所。
 - b. 搬運、保管時，避免振動或衝撞。
2. 使用前注意事項：
 - a. 萬一，產品本體或是包裝袋(滅菌袋)破損或是污損時，請勿使用。
 - b. 產品請於即將使用前才由滅菌袋中取出並且於潔淨的場所中使用。
3. 使用時注意事項：
 - a. 請遵照醫師的指示使用。
 - b. 萬一，認為產品有血液漏出憂慮時，請立即中止血液透析，並在醫師的指導下更換新製品。
4. 其他注意事項：
 - a. 產品為拋棄式，只限用一次。
 - b. 此產品因使用於血液透析，請和一般廢棄物區別予以處理。

產品用途

血液淨化用，連接動靜脈血管與血液迴路導管間之注射針導管；每次血液透析使用兩條，血液由動脈血管動靜脈瘻管針輸送到血液迴路導管輸出進行透析，淨化後之血液最後再由動靜脈瘻管針輸送回靜脈血管。

產品規格

型號	樣式	規格	
		AV 針外徑	長度(inch)
SD-A15G-1	固定式蝴蝶翼	ø1.8mm	1"
SD-A15G-2	固定式蝴蝶翼	ø1.8mm	1.1/2"
SD-A15G-3	固定式蝴蝶翼	ø1.8mm	1.1/4"
SD-A15G-4	旋轉式蝴蝶翼	ø1.8mm	1"
SD-A15G-5	旋轉式蝴蝶翼	ø1.8mm	1.1/2"
SD-A15G-6	旋轉式蝴蝶翼	ø1.8mm	1.1/4"
SD-A16G-1	固定式蝴蝶翼	ø1.6mm	1"
SD-A16G-2	固定式蝴蝶翼	ø1.6mm	1.1/2"
SD-A16G-3	固定式蝴蝶翼	ø1.6mm	1.1/4"
SD-A16G-4	旋轉式蝴蝶翼	ø1.6mm	1"
SD-A16G-5	旋轉式蝴蝶翼	ø1.6mm	1.1/2"
SD-A16G-6	旋轉式蝴蝶翼	ø1.6mm	1.1/4"
SD-A17G-1	固定式蝴蝶翼	ø1.4mm	1"
SD-A17G-2	固定式蝴蝶翼	ø1.4mm	1.1/2"
SD-A17G-3	固定式蝴蝶翼	ø1.4mm	1.1/4"
SD-A17G-4	旋轉式蝴蝶翼	ø1.4mm	1"
SD-A17G-5	旋轉式蝴蝶翼	ø1.4mm	1.1/2"
SD-A17G-6	旋轉式蝴蝶翼	ø1.4mm	1.1/4"

藥商 / 善德生化科技股份有限公司
SUNDER BIOMEDICAL TECH. CO., LTD.
臺中市西區五權路 1-67 號 10F-1

製造廠 / 善德生化科技股份有限公司 襄忠廠
SUNDER BIOMEDICAL TECH. CO., LTD. PAO-CHUNG FACTORY
雲林縣褒忠鄉中民村中正路 16 號